



Regelmäßige Wartung (tägliche Reinigung) - Benötigte Werkzeuge: Multi-Tool - Reinigungsbürste und Reinigungslösung - Einwegtuch

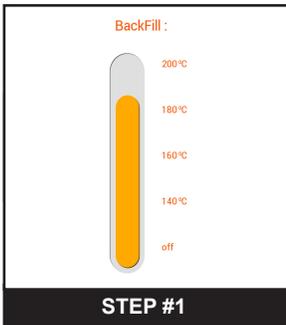


STEP #1

Drücken Sie die restliche Guttapercha aus, während das Gerät noch heiß ist und stellen Sie sicher, dass das Obtura III MAX Handstück ausgeschaltet ist.

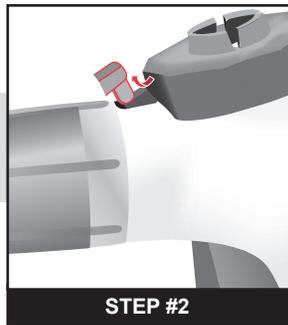


STEP #2

Entriegeln und entfernen Sie den Hitzeschutz mit dem Multi-Tool oder einer Sonde

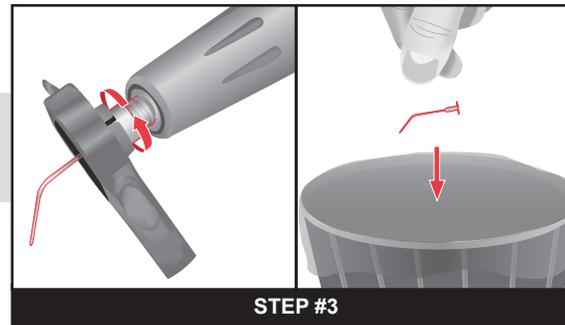


STEP #3

Verwenden Sie das Multi-Tool, um die Nadelmutter vom Heizungsgewinde abzuschrauben. Legen Sie die Mutter beiseite. Entsorgen Sie die Nadel (für eine optimale Leistung sollten die Obtura-Applikator-Nadeln nur einmal verwendet werden)

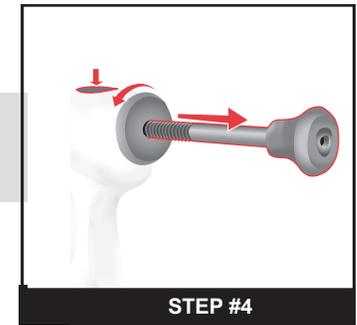


STEP #4

Drücken und halten Sie den Entriegelungsknopf, um den Kolben und die Buchse aus dem Handstück zu entfernen. Das Handstück sollte hierzu noch warm sein. Buchse reinigen und auf Risse prüfen.

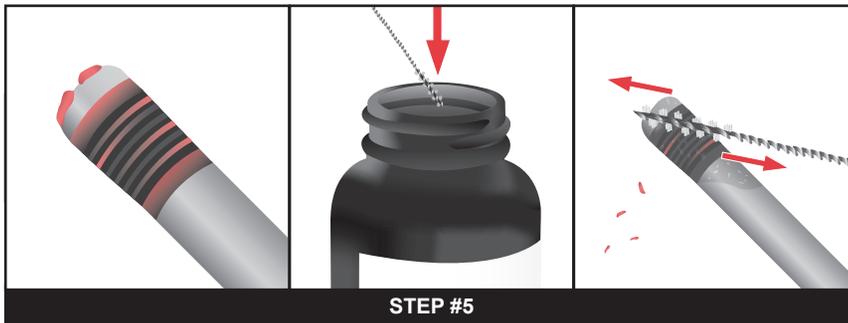


STEP #5

Untersuchen Sie die Kolbendichtung auf Guttapercha. Wenn Guttapercha vorhanden ist, tauchen Sie die Reinigungsbürste in die Reinigungslösung, so dass die Bürste vollständig bedeckt ist. Reinigen Sie die Kolbendichtung mit der Reinigungsbürste mit einer Hin- und Herbewegung, bis alle sichtbare Guttapercha entfernt ist.

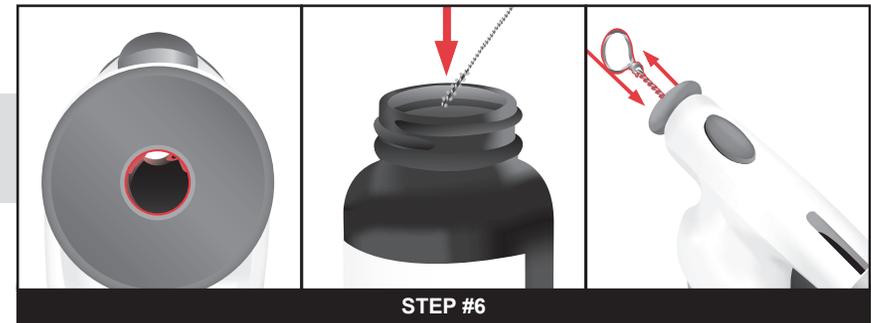

STEP #6

Untersuchen Sie die Innenseite des Handstückschafts auf Guttapercha. Falls Guttapercha vorhanden ist, tauchen Sie die Reinigungsbürste erneut in die Reinigungslösung, so dass die Bürste vollständig bedeckt ist. Setzen Sie die Reinigungsbürste im Inneren des Handstückschafts ein und reinigen Sie mit einer Hin- und Herbewegung, bis alle sichtbare Guttapercha entfernt ist.

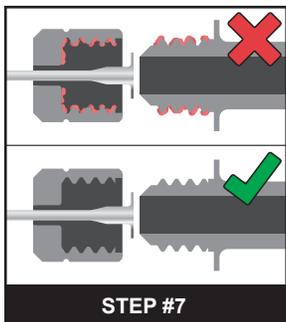

STEP #7

Das Gewinde auf Guttapercha-Reste untersuchen. Falls vorhanden, mit Drahtbürste entfernen. Das Gewinde muss frei von Rückständen sein, damit die Nadel und die Nadelmutter richtig sitzen.




STEP #8

Bauen Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Legen Sie das Handstück wieder in seine Halterung.



WARNING

Das Obtura III MAX Handstück darf auf keinen Fall in die Reinigungslösung getaucht werden.

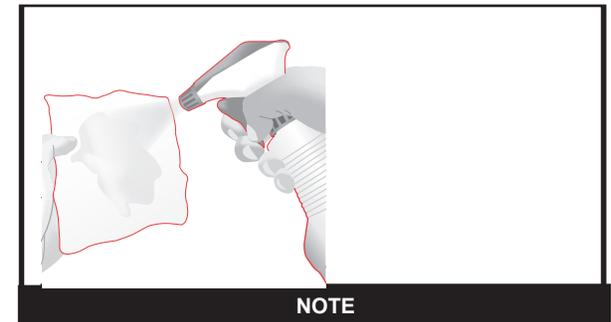

NOTE

Für eine optimale Pflege verwenden Sie die Birex®-Lösung zur Reinigung, Desinfektion und Desodorierung Ihres Obtura III MAX. Sprühen Sie die Reinigungslösung immer in ein Einmaltuch und wischen Sie es dann ab. Sprühen Sie niemals direkt auf das Handstück. Obtura Spartan genehmigt die Verwendung von CaviCide als Alternative

